

EXACTECH | **CADERA**

Soluciones femorales primarias.



NOVATION[®]
Sistema Integral de Cadera

Hemiartroplastias.

**Cabezas bipolares y monopolares.
Vástago Novation CFS cementado**



CABEZA MONOPOLAR. VENTAJAS

- Diseño modular.
- Cinco longitudes del casquillo: -3,5mm, 0mm, 3,5mm, 7mm, 10mm.
- Cabeza monopolar de cromo cobalto.
- Conos con diseño mecanizado, para obtener un bloqueo óptimo.

CABEZA BIPOLAR. VENTAJAS

- Fácil montaje con presión manual.
- Excelente integridad de bloqueo.
- Diseñado para maximizar la durabilidad de polietileno.
- Cabeza bipolar de cromo cobalto.
- Se facilita una herramienta de desensamblaje.
- Compatibles con cabezas Ø28mm.



MÉTODO DE MONTAJE

CABEZA MONOPOLAR


1. Después de limpiar y secar el cono del cuello del vástago, coloque el casquillo correspondiente en el vástago femoral utilizando presión manual.
2. Limpie y seque la parte exterior de del casquillo y coloque la cabeza monopolar.
3. Impacte la cabeza monopolar sobre el casquillo utilizando el impactor de cabezas 12/14.

VÁSTAGO NOVATION CFS

Los vástagos femorales cementados Novation CFS han sido diseñados para facilitar al cirujano una excelente fijación inicial y una estabilidad a largo plazo. Incluidos dentro del sistema integral de cadera Novation, comparten instrumental con los vástagos primarios Novation Tapered y Cemented Plus, ofreciendo una gran flexibilidad intraoperatoria.

CABEZA BIPOLAR

1. Elimine el protector del implante y deséchelo. Quite el anillo de bloqueo (Figura 1).
1. Coloque la cabeza femoral Ø28mm en el componente bipolar (Figura 2).
1. Coloque el anillo de bloqueo (Figura 3).
1. Ensamble con presión manual hasta que se produzca un chasquido audible (Figura 4).
1. La cabeza femoral seleccionada se coloca sobre el cono del vástago femoral y se fija utilizando el impactor de cabezas 12/14 (Figura 5).

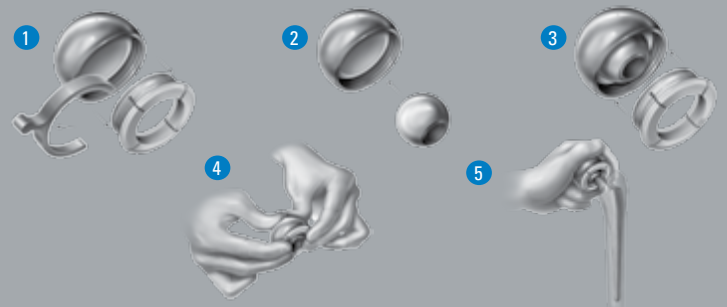

Tamaño (mm)	VÁSTAGO NOVATION CFS
9	n/d
10	168-50-10
11	168-50-11
12	168-50-12
13	168-50-13
14	168-50-14
15	168-50-15
16	n/d
17	168-50-17
18	n/d

Longitud del cuello	Casquillo para monopolares	Cabeza Ø28mm para bipolares
-3,5	102-60-97	142-28-93
+0	102-60-00	142-28-93
+3,5	102-60-03	142-28-03
+7	102-60-07	142-28-07
+10	102-60-10	142-28-10

Ø (mm)	CABEZA MONOPOLAR	CABEZA BIPOLAR
40	n/d	BP-2840
41	n/d	BP-2841
42	102-20-42	BP-2842
43	102-20-43	BP-2843
44	102-20-44	BP-2844
45	102-20-45	BP-2845
46	102-20-46	BP-2846
47	102-20-47	BP-2847
48	102-20-48	BP-2848
49	102-20-49	BP-2849
50	102-20-50	BP-2850
51	102-20-51	BP-2851
52	102-20-52	BP-2852
53	102-20-53	BP-2853
54	102-20-54	BP-2854
55	102-20-55	BP-2855
57	n/d	BP-2857
59	n/d	BP-2859
61	n/d	BP-2861