

EXACTECH | **CADERA**

*Soluciones femorales.*



**ALTEON™**

Vástago femoral  
Alteon Tapered Wedge

**Exactech®**

*Surgeon focused. Patient driven.™*

# ALTEON™

## Vástago femoral Alteon Tapered Wedge

El vástago femoral Alteon™ Tapered Wedge incorpora características de diseño específicas para conseguir la estabilidad mecánica inmediata entre las corticales lateral y medial del canal femoral.



**Intuitivo:** longitud y tamaño proximal/distal optimizados para conseguir la fijación en todo tipo de fémures (Dorr A, B, C) sin comprometer las características del implante o la técnica quirúrgica.<sup>1</sup>

**Estable:** el implante llena el aspecto medial/lateral con una geometría lateral diseñada para distribuir las cargas en el fémur proximal y proporcionar estabilidad mecánica inicial.<sup>2</sup>

**Versátil:** cuatro agrupaciones de longitud de cuello y un rango de vástagos/offsets que proporcionan múltiples opciones para restaurar la anatomía del paciente sin necesidad de modularidad.

### DETALLE DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA

Las imágenes debajo muestran los pasos principales de la técnica quirúrgica para ser utilizada en cualquier tipo de abordaje.



Preparación femoral



Reducción de prueba



Implantación del vástago definitivo

### REFERENCIAS

| Talla | Plasma Spray Térmico (TPS) |                  |
|-------|----------------------------|------------------|
|       | Offset estándar            | Offset extendido |
| 1     | 188-00-01                  | 188-01-01        |
| 2     | 188-00-02                  | 188-01-02        |
| 3     | 188-00-03                  | 188-01-03        |
| 4     | 188-00-04                  | 188-01-04        |
| 5     | 188-00-05                  | 188-01-05        |
| 6     | 188-00-06                  | 188-01-06        |
| 7     | 188-00-07                  | 188-01-07        |
| 8     | 188-00-08                  | 188-01-08        |
| 9     | 188-00-09                  | 188-01-09        |
| 10    | 188-00-10                  | 188-01-10        |
| 11    | 188-00-11                  | 188-01-11        |
| 12    | 188-00-12                  | 188-01-12        |
| 13    | 188-00-13                  | 188-01-13        |
| 14    | 188-00-14                  | 188-01-14        |
| 15    | 188-00-15                  | 188-01-15        |

### Bibliografía:

1. Data on File at Exactech. TR-2013-039. Wedge Femoral Stem Template Study Report.
2. Leali A, Fetto J, Insler H, Elfenbein D. The effect of a lateral flare feature on implant stability. Int. Orthop. 2002;26(3):166-9.

Para obtener información adicional del dispositivo, consulte el sistema de instrucciones de uso del vástago femoral Alteon Tapered Wedge para una descripción del dispositivo, indicaciones, contraindicaciones, precauciones y advertencias. Para más información sobre el producto, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente, Exactech, Inc., 2320 NW 66th Court, Gainesville, Florida 32653-1630, USA. (352) 377-1140, (800) 392-2832 ó FAX (352) 378-2617.

Exactech, como fabricante de este dispositivo, no practica la medicina, y no es responsable de recomendar la adecuada técnica quirúrgica para el uso en un paciente en particular. Estas directrices están destinadas meramente a ser informativas y cada cirujano deberá valorar la idoneidad de estas directrices en función de su formación personal y experiencia médica. Antes de la utilización de este sistema, el cirujano debe consultar el prospecto del producto para advertencias generales, precauciones, indicaciones de uso, contraindicaciones y efectos adversos.

Exactech, Inc. cuenta con oficinas y distribuidores en todo el mundo. Para más información acerca de los productos Exactech disponibles en tu país, por favor visita: [www.exac.com](http://www.exac.com)